

EUROPROBE

Mise en route du module Gamma en 3 étapes



1 - Brancher le cordon d'alimentation

2 - Brancher la ou les sondes avant la mise en route :

Signe sur le connecteur  vers le haut **

Reconnaissance automatique des sondes. A la mise en marche, la diode verte s'allumera pour indiquer la sonde en fonction



3 - Mettre en route l'appareil en appuyant sur le bouton. Par défaut : Tc99, échelle de sensibilité à 1000, intégration time à 1 seconde, son avec BIP

Réglage du volume sonore : Tourner le bouton lorsque la diode verte est allumée, sinon appuyer avant de tourner

Réglage de l'échelle de sensibilité : Tourner le bouton lorsque la diode verte est éteinte, sinon appuyer avant de tourner

Exemple pour 50 MBq de Tc99:

Injection la veille : Echelle sonore à 100 ou 250

Injection le matin : Echelle sonore à 500 ou 1000

Possibilités de réglages avant ou pendant l'utilisation

Isotope selection : Tc99 - Appuyer pour sélectionner un autre isotope

Counting time : 10" - Appuyer pour sélectionner une autre variable de temps

Integration time : 1" - Appuyer pour sélectionner un autre temps d'intégration

Select config : Appuyer pour sélectionner la configuration (N°0 par défaut)

Sound mode : BIP - Appuyer pour sélectionner FM



Diode verte

ARRET : ETEINDRE L'APPAREIL AVANT DE (DE)BRANCHER LES SONDES

Avertissement : Ceci est un guide de mise en route*. Il ne vous dispense pas de la lecture du manuel avant l'utilisation de l'appareil.

EUROMEDICAL
INSTRUMENTS

EUROPROBE

Mise en route du module de Fluorescence



1 - Poser le module Gamma sur le module de Fluorescence -
Fixer les velcros puis connecter les deux modules grâce au câble suivant le code couleur

2 - Brancher la sonde DUAL Gamma Fluo avant la mise en route **



3 - Connecter la pédale à l'appareil 

4 - Mettre en route l'appareil en appuyant sur le bouton. Par défaut : Tc99



Utilisation : Passer de la détection Gamma (Tc99) à la détection de la Fluorescence (Opto) en pressant la pédale durant 3 secondes.

Contacts

Coordonnées commerciales

EuroMedical Instruments
BP 241 – 3 rue de l'arrivée
Bureau 1018 bis
75749 Paris Cedex 15- France
Tel : + 33 9 83 62 63 17
Fax : + 33 9 83 82 63 17
sales@em-instruments.com
www.em-instruments.com

Fabricant - SAV

Eurorad
2 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim - France
Tel : +33 3 88 26 81 30
Fax : +33 3 88 28 45 48
www.eurorad.com
info@eurorad.com



EUROMEDICAL
INSTRUMENTS

**Toutes les sondes doivent être désinfectées et placées dans un manchon stérile avant utilisation